

V958 | Prisma SMART Max - Guia Rápido Löwenstein ®

PARÂMETROS	CPAP	AutoSet	INTERVALO
Pressão fixa	●		4 - 20
Pressão min		●	4 - 20
Pressão máx		●	4 - 20
Resposta*		●	Standard/Dinâmica
SoftPAP	●	●	On / Off
Nível de SoftPAP	●	●	1, 2
Soft Start time	●	●	Desl / 5 - 45
Soft Start pressure	●	●	4 - Pressão/Pressão min

* O objetivo da resposta "Standard" é maximizar a aceitação do doente através de pressões o mais baixas possível. Esta configuração adapta-se aos novos utilizadores e doentes de APAP não tolerantes a pressões flutuantes ou elevadas.

A resposta "Dinâmica" adapta-se a doentes com síndrome respiratória das vias aéreas superiores e ajuda a otimizar o tratamento dos doentes já adaptados ao APAP. Pode ser recomendado para doentes que beneficiam de pressões elevadas.