

Recomendação Breas no uso de filtros anti-bacterianos com os Vivos

Este document aconselha no potencial uso adicional de filtros anti-bacterianos com equipamentos Breas por forma a ajudar a proteger o paciente, bem como o meio ambiente.

Este aviso não substitui as as Instruções no Manual de Uso/Hospitalar dos equipamentos. Por favor consultar os Manuais para mais informações.

BREAS

Recomendações Gerais (1)


- Por favor considerar estas recomendações quando utilizados os nossos equipamentos sob condições de alto risco como o actual COVID-19.
- Use filtros e circuitos como mostrado neste documento
 - O filtro perto do paciente ajuda a proteger os cuidadores quando o paciente esta infectado
 - O filtro na saída de ar do equipamento irá proteger o equipamento de ficar contaminado
- O filtro interno do equipamento (cinza/branco) não é valido contra agentes patogenicos mas somente filtro de poeiras e/ou particulas
- Assegurar fazer o teste de Alarme de Disconexão do ventilador com a montagem total (se aplicavel)
- Fazer o Teste de Pre-Uso com os filtros colocados – Retirar (ou bloquear) a saída de fuga durante o Teste de Pre-Uso

Recomendações Gerais (2)


- Testar alarmes e configurações, corrigir o tratamento com a montagem total do circuito colocada
- Completar a montagem do circuito e conectar o paciente antes de iniciar/ligar o equipamento
- Desligar o equipamento antes de desconectar o equipamento
- Usar apenas filtros bacterianos de Baixa Resistencia
- Trocar os filtros como recomendado pelo fabricante dos mesmos
 - Se as recomendações não forem claras, recomendamos que:
 - Substituir filtros cada 24H
 - Substituir filtros entre pacientes
 - Substituir filtros quando estão visualmente contaminados

Ventilação Não Invasiva - VNI


Uso do Circuito Unico com Fuga para VNI

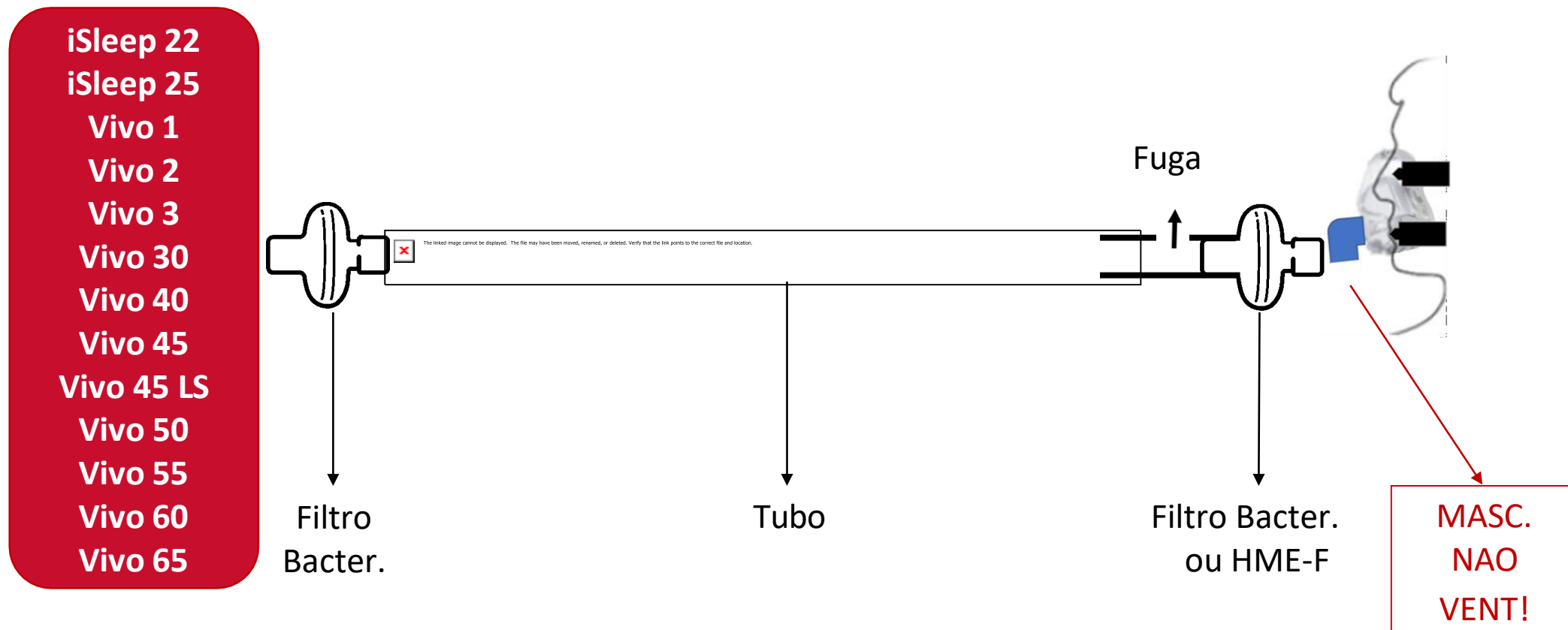

Uso do Circuito Único com Válvula Exp. para VNI

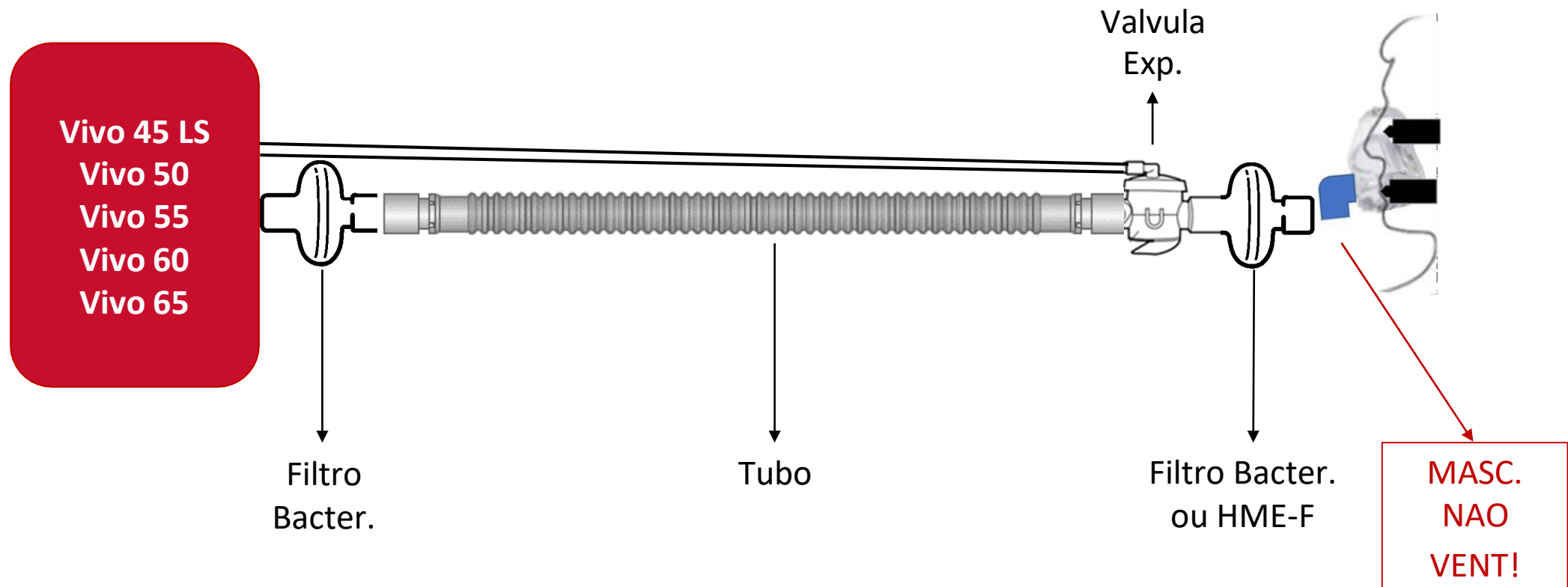


Uso do Circuito Duplo para VNI

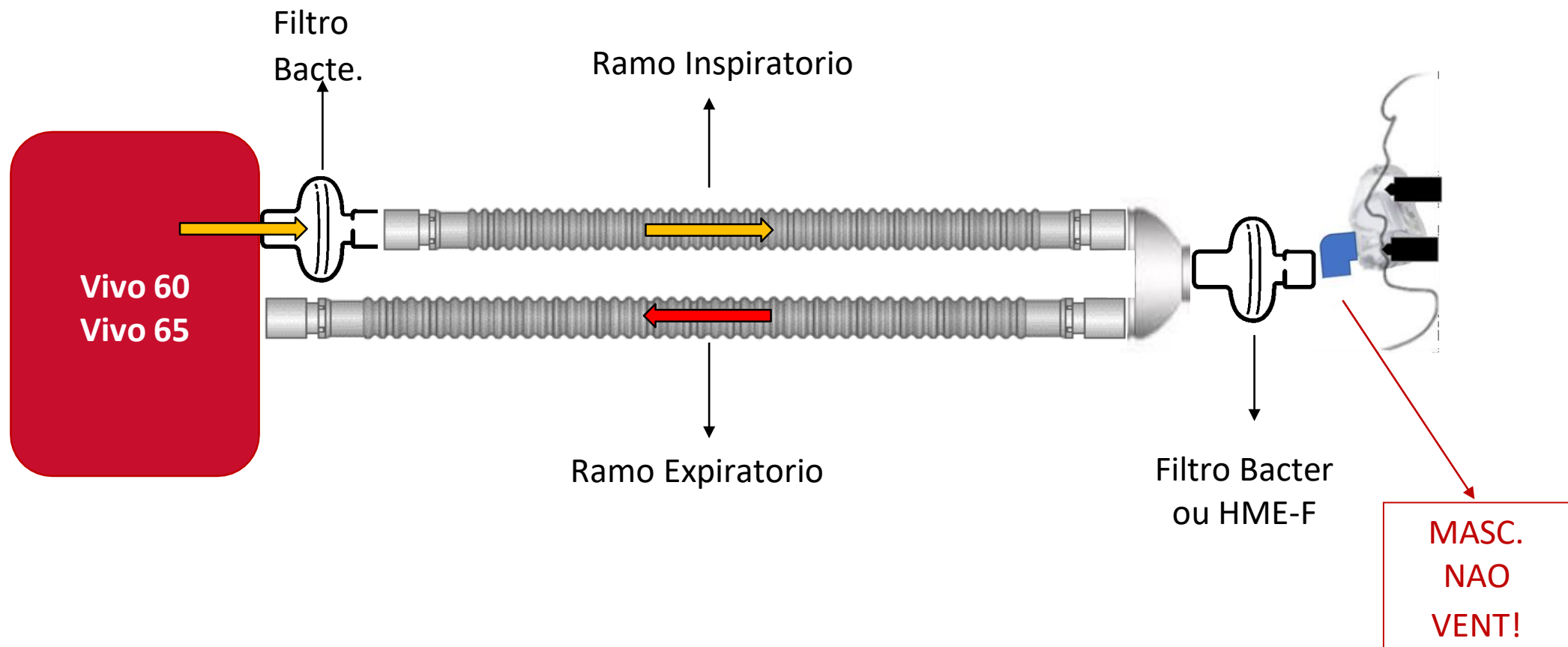


Ventilação Invasiva


Uso do Circuito Duplo para Ventilação Invasiva

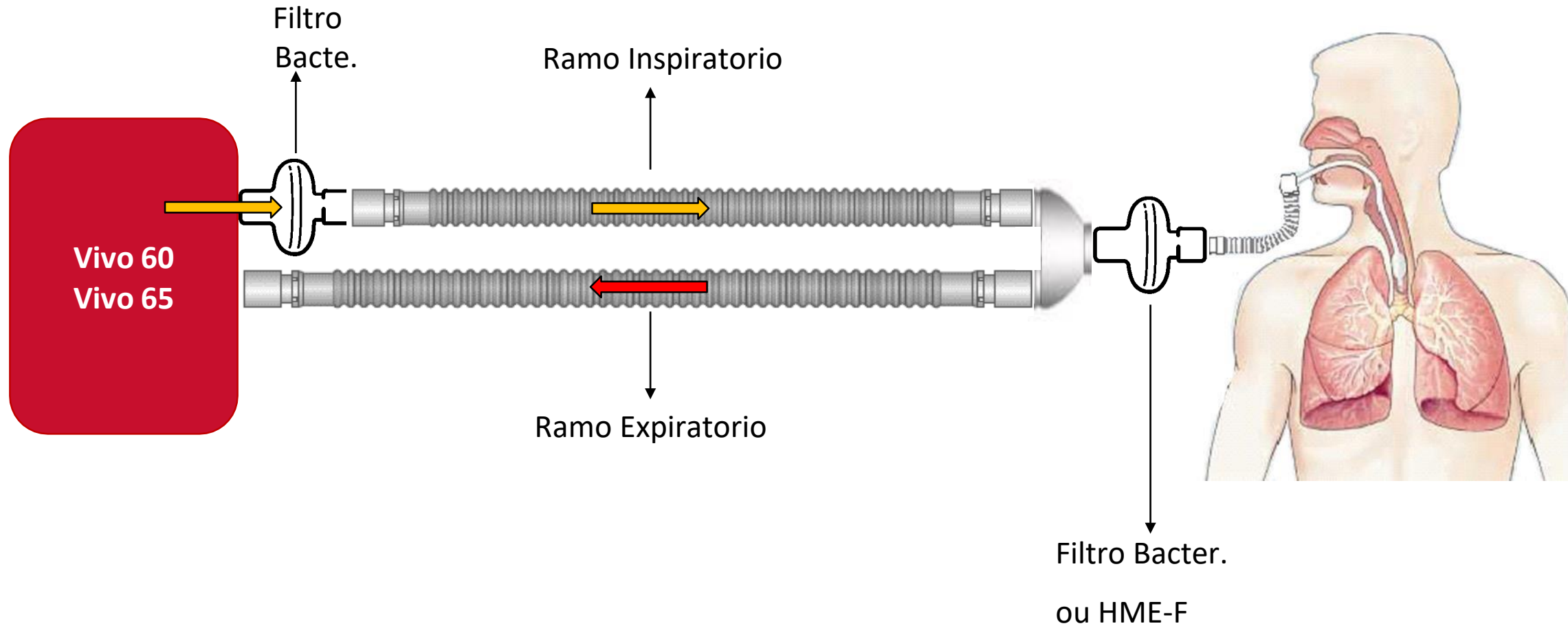

Uso do Circuito Unico com Fuga na Ventilação Invasiva

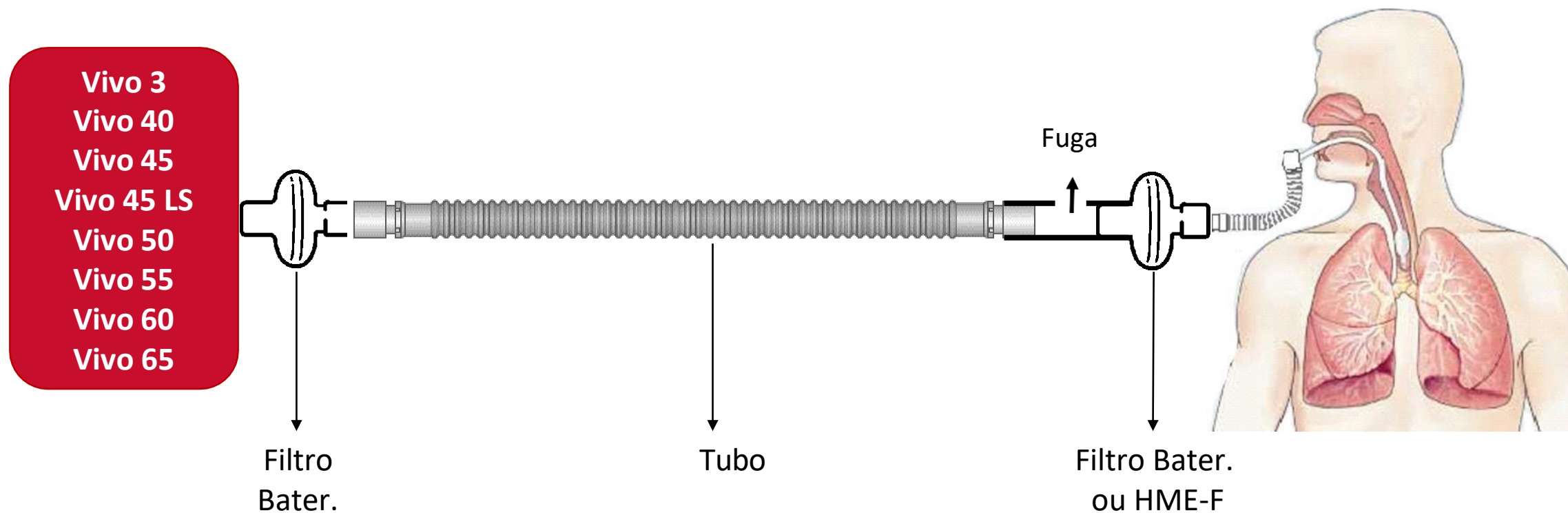

Uso do Circuito Unico com Valvula Exp. na Ventilação Invasiva

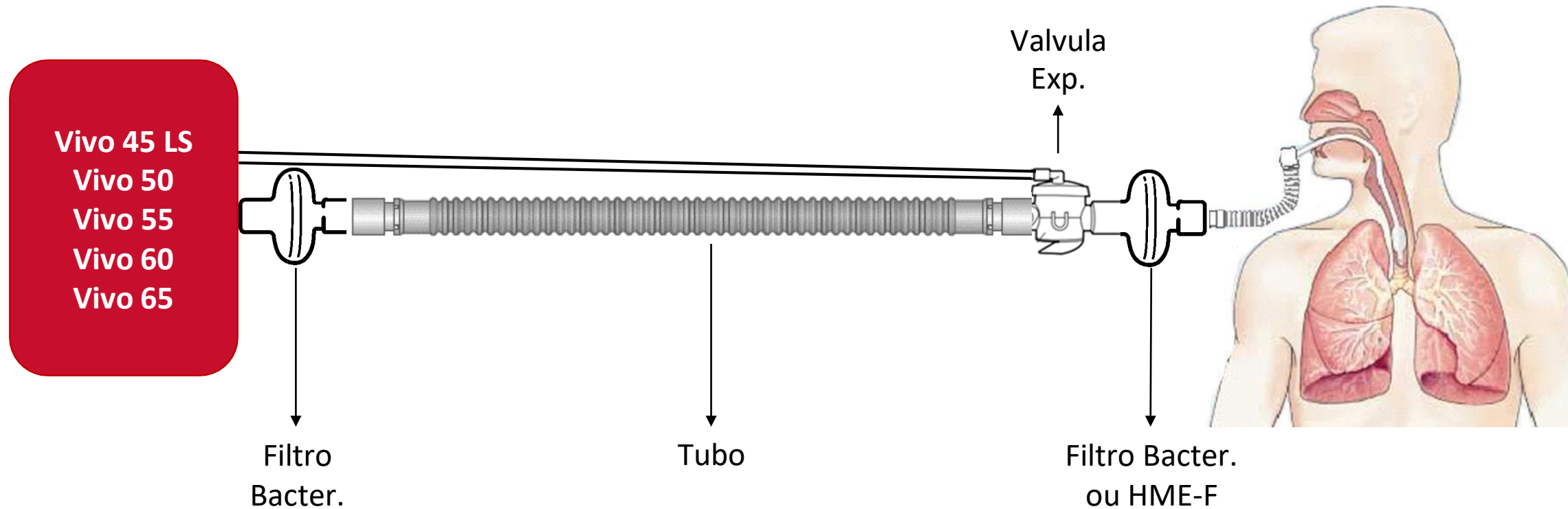

Como fazer a desinfecção das superfícies?

- A Breas aconselha o uso de um pano sem fiapos e Etanol 70% para desinfetar as superfícies externas dos equipamentos