

V912 / V951 | Trilogy EVO – Philips Respironics®

PARÂMETROS	CPAP	ST	AVAPS-AE	AC-PC	PSV	MPV-PC	SIMV-PC	AC-VC	SIMV-VC	MPV-VC	INTERVALO
Pressão Fixa	●										3 - 25
IPAP		●									3 - 60
EPAP / PEEP		●	● EPAP min/máx	●	●	●	●	●	●	●	3 - 25 (circuito passivo) / 0 - 35 (circuito ativo) / 0 - 25 (MPV)
PS / PC			● PC - lig/desl	●	●	●	●		●		0 - 40 (AVAPS-AE) / 0 - 57 (PEEP + PS < 60)
FR		●	●	●		●	●	●	●	●	Auto / 0 - 80
VC *		●	●	●	●			●	●	●	50 - 2000 (passivo ou ativo) / 200 - 2000 (MPV) / 25 - 2000 (circuito duplo)
Ti		●	●	●		●	●	●	●	●	0.3 - 5.0
Ti min / Ti máx		● lig/desl	● lig/desl		● lig/desl		● lig/desl		● lig/desl		0.3 - 3.0
T. Aumento		●	●	●	●	●	●				0 - 6
Ativação e Ciclo	●	●	●	●	●		●	●	●		Auto - Trak (circuito passivo) / Auto - Trak sensível (circuito passivo) / Acionador de fluxo (todos circuitos)
Trigger Fluxo l/min **	●	●	●	●	●		●	●			0.5 - 9.0
Ciclo de Fluxo **	●	●	●	●	●		●	●			10% - 90%
Padrão Fluxo								●	●	●	Quadrado / Rampa

* Nos modos ST, AC-PC e PSV VC apenas disponível se for ativado o AVAPS

** Apenas disponível se na ativação for selecionado o acionador de fluxo

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.