

# V963 | Vivo 45 - Breas®

PARÂMETROS	CPAP	PSV *	PSV Valvo**	PCV *	PCV(A)**	PCV(A) Valvo**	PCV Valvo**	PCV-MPV***	INTERVALO
<b>Pressão Fixa</b>	●								4 - 20
<b>IPAP / P Inspiratória</b>		●		●	●			●	4 - 40
<b>EPAP / PEEP</b>		●	●	●	●	●	●		4 - 20 / 2 - 20 (adulto/ped.)
<b>FR</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	4 - 40 / 6 - 60 (adulto/ped.)
<b>Vol Alvo</b>			●			●	●		300 - 2000 / 100 - 500
<b>P Inspiratória min/máx</b>			●			●	●		4 - 40
<b>Ti</b>				●	●	●	●		0.3 - 5 / 0.3 - 2 (adulto/ped.)
<b>Ti Segurança</b>		●	●						0.3 - 5 / 0.3 - 2 (adulto/ped.)
<b>Ti min</b>		●	●						Desl / 0.3 - 3 / 2 (adulto/ped.)
<b>Ti máx</b>		●	●						Desl / 0.3 - 5 / 2 (adulto/ped.)
<b>T. Aumento</b>		●	●	●	●	●	●	●	1 - 9
<b>Trigger Inspiratório</b>		●	●		●	●		●	1 - 9
<b>Trigger Expiratório</b>		●	●						1 - 9

\* Para selecionar o Modo PSV ou PCV deverá selecionar a opção "Suporte" ou "Assistido/Controlado" respetivamente. Nos modos PS V Valvo e PCV Valvo o Valvo dependerá do acionamento da opção Vol alvo. No modo PCV (A) a opção de "assistido" dependerá do acionamento do trigger inspiratório.

\*\* A opção de assistido (A) ou com volume alvo (V alvo) nos modos PSV ou PCV depende do acionamento dos triggers, FR, Timin/máx e Valvo.

\*\*\* Para selecionar o modo PCV -MPV deverá selecionar a opção MPV.

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.