

As instruções abaixo destinam-se a ser utilizadas como uma ferramenta de referência para cuidadores que estão já familiarizados com a utilização de uma bomba de insulina e com a terapêutica de insulina em geral. Nem todos os ecrãs são apresentados. Para informações mais detalhadas acerca do funcionamento da bomba de insulina t:slim X2, consulte o Manual de utilizador.


## Parar a administração de insulina



Toque em **OPÇÕES**.



Toque em **PARAR INSULINA**.

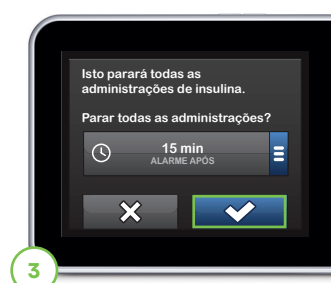

Toque em  para aceitar a definição exibida. Para alterar a definição de Retomar alarme da bomba, toque no painel a meio do ecrã.



Selecione o botão que corresponde à hora em que pretende a exibição da mensagem “Retomar alarme da bomba”.

**Nota:** a bomba NÃO retoma automaticamente a administração de insulina depois de decorrido o tempo. O utilizador receberá uma mensagem “Retomar alarme da bomba” após o período selecionado (15 min, 30 min, 45 min, ou 1 hora).

Se selecionar outro valor, a bomba voltará ao ecrã de confirmação anterior com a seleção atualizada.

## Retomar a administração de insulina


**Nota:** Se o temporizador de uma taxa basal temporária ainda estiver ativo quando a insulina é retomada, a taxa basal temporária continuará. Se um bólus for administrado antes de parar a insulina, a insulina restante a ser administrada será cancelada.



Toque em **OPÇÕES**.



Toque em **RETOMAR INSULINA**.

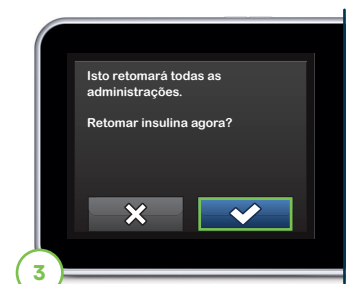

Toque em  para confirmar.

**Informações importantes de segurança:** a bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração de insulina por via subcutânea, a débitos fixos e variáveis, para a gestão da diabetes mellitus em pessoas que requerem insulina. A bomba consegue comunicar, de forma fiável e segura, com dispositivos compatíveis, ligados digitalmente. A bomba é indicada para utilização em indivíduos com idade igual ou superior a seis anos. A bomba destina-se a um único utilizador e a uso doméstico. A bomba destina-se a ser utilizada com insulina NovoRapid ou Humalog de 100 unidades. Os utilizadores da bomba devem: estar dispostos a utilizar a bomba de insulina e todos os outros componentes do sistema de acordo com as suas respetivas instruções de utilização; efetuar os testes de glicemia como recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidades adequadas de contagem de hidratos de carbono; demonstrar capacidades suficientes de autogestão da diabetes; consultar o profissional de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequadas para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os alertas. A bomba t:slim X2 tem de ser retirada antes de quaisquer exames de RM, TAC, ou diatermia. Para informações adicionais importantes de segurança, visite [tandemdiabetes.com/safetyinfo](http://tandemdiabetes.com/safetyinfo).

CMR-DB204/1

© 2022 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play e o logótipo Google Play são marcas registadas da Google LLC. ML-1009894\_A